

SISTEMA INTERI[®]

GUÍA DEL PACIENTE

¿Qué hace Interi?

Su cirujano usa el sistema Interi para ayudar a evitar las complicaciones provocadas por una mala cicatrización interna, y para que sus cuidados posoperatorios sean lo más sencillos posible.

¿Cómo funciona Interi?

Durante la cirugía, el médico introduce una sonda fina y flexible en la parte del cuerpo donde se ha realizado la intervención. La sonda atraviesa la piel y se conecta a una unidad de terapia, la cual proporciona una succión suave y constante a los espacios del interior, y colecta los fluidos que pueden provocar una mala cicatrización.


¿Qué debo hacer en casa?

Debe asumir un papel importante en el control de su recuperación. Interi le facilita esta tarea. Existen algunos pasos importantes que debe seguir en casa durante su proceso de curación. Lea esta Guía del paciente y utilícela como referencia en casa.




Comuníquese con su médico o profesional de enfermería si tiene alguna pregunta relacionada con el uso de Interi en casa.

1. REVISE el flujo de fluido: LEA y REGISTRE el nivel de fluido. COMPÁRELO con el último número registrado.

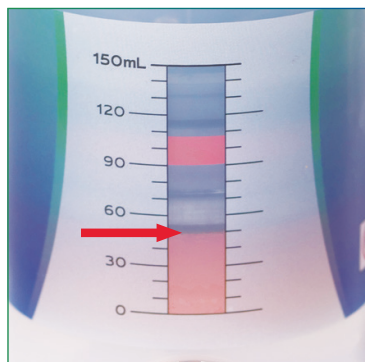

El nivel de fluido es de 50 ml

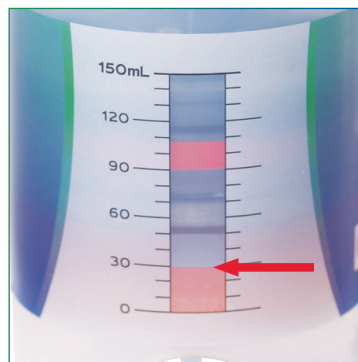


El nivel de fluido es de 30 ml; hay algo de aire en la unidad de terapia

IMPORTANTE:

¿El nivel de fluido es más alto que la última vez que lo revisó?
En caso afirmativo, sabrá que el fluido fluye hacia la unidad de terapia.

SI EL NIVEL DE FLUIDO NO AUMENTA: CONSULTE LOS PASOS EN LA PÁGINA 4

2. BUSQUE la franja roja en su unidad de terapia para ver si está llena.

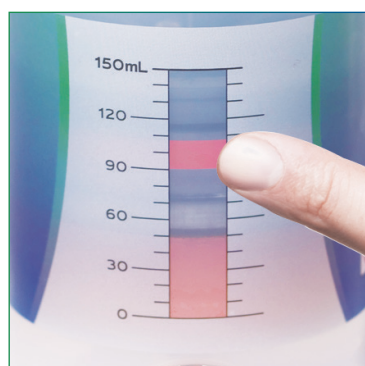

NO está llena



Está llena

IMPORTANTE:

¿La franja roja está en la banda circular de la parte superior de la unidad de terapia?
Si no es así, puede volver a guardar la unidad en la funda hasta la próxima revisión.

SI LA FRANJA ROJA ESTÁ EN LA BANDA CIRCULAR, SIGNIFICA QUE LA UNIDAD DE TERAPIA ESTÁ LLENA Y DEBE CAMBIARSE DE INMEDIATO.



3. CAMBIE la unidad de terapia cuando esté llena.

- A. Lávese bien las manos.
- B. Saque una nueva unidad de terapia de la caja.
- C. Presione el botón gris del conector y retire la unidad de terapia usada.
- D. Sostenga el conector en posición vertical como se muestra en la imagen.
- E. Conecte la nueva unidad de terapia. Para ello, empuje el conector sobre el vástago hasta que escuche un clic.
- F. Tire suavemente de la sonda para asegurarse de que la conexión es segura.
- G. PRESIONE EL BOTÓN DE INICIO para activar la unidad de terapia. Debería escuchar un clic.
- H. Guarde la unidad de terapia en la funda de transporte.



IMPORTANTE:





Al acostarse, si la franja roja está cerca de la parte superior de la ventana de fluido, cambie la unidad de terapia por una nueva.

Escanee el código QR para ver el sistema Interi en acción:



Video para usuarios del sistema Interi

SI LE PREOCUPA QUE NO FLUYA FLUIDO,
REALICE ESTAS 4 COMPROBACIONES:

	SI...	ENTONCES ...
1	 <p>La sonda está retorcida o pinzada ...</p>	<p>Enderece la sonda.</p>
2	 <p>El botón de inicio no está presionado ...</p>	<p>Presione el botón de inicio.</p>
3	 <p>La unidad de terapia está llena ...</p>	<p>Cámbiela por una nueva; consulte la página 3.</p>
4	 <p>Si los pasos anteriores no funcionan, podría haber un coágulo bloqueando el flujo ...</p>	<p>Limpie el coágulo; consulte la página 5.</p>

Espera 1 hora y vuelva a revisar la unidad para asegurarse de que el fluido fluye. Es posible que el fluido fluya lentamente, pero debería ver que el nivel de fluido aumenta en la ventana de fluido.

Si la preocupación persiste, llame a su médico.

¿Qué debe esperar del flujo de fluido?


Durante los primeros días después de la cirugía, el fluido será sanguinolento. Puede cambiar de color rojo a rosa y luego a amarillo claro o transparente, y la cantidad de fluido disminuirá con el tiempo. El médico le indicará cuándo dejará de usar Interi y cuándo se le retirará la sonda.



ELIMINACIÓN DE COÁGULOS


1. Revise el conector y el vástago en busca de coágulos

- A. Lávese bien las manos.
- B. Desconecte la unidad de terapia del conector. No presione el vástago.
- C. Sostenga el conector en posición vertical como se muestra en la imagen.
- D. Retire con cuidado los coágulos tanto del vástago de la unidad de terapia como del conector de la sonda.
- E. Vuelva a conectar la unidad de terapia.
- F. Revise el flujo de fluido y repita los pasos si es necesario.

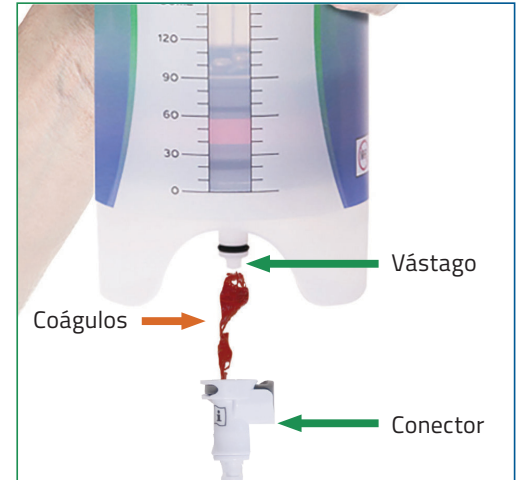

2. Exprima la sonda si hay coágulos visibles en ella

- A. Antes de exprimir la sonda, verifique que esté conectada a una unidad de terapia que no esté llena. De lo contrario, cambie la unidad.
- B. Use una mano para sujetar y pellizcar la sonda justo por debajo del lugar donde está insertada. Procure no tirar de la sonda en el punto de salida.
- C. Con el pulgar y el índice de la otra mano, pellizque la sonda justo por debajo de donde la está sujetando.
- D. Con un movimiento lento y firme, deslice los dedos por toda la sonda en sentido contrario a su cuerpo. Puede usar una toallita humedecida con alcohol para facilitar este movimiento de "extracción".
- E. Siga bajando por la sonda para mover los coágulos hacia la unidad de terapia.

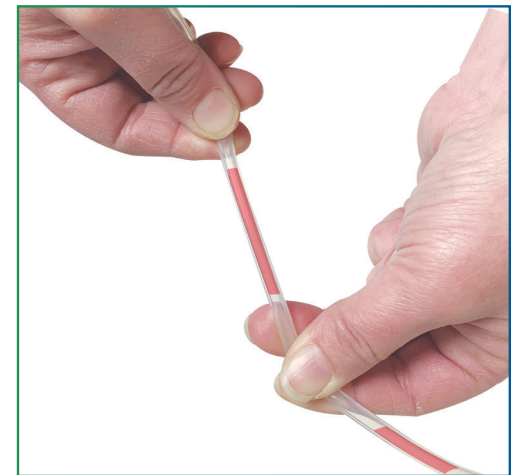

Exprimir la sonda


Si sigue los pasos anteriores y el fluido no fluye, es posible que quede un coágulo en la unidad de terapia. Cambie la unidad por una nueva.

Escanee el código QR para ver un video sobre el manejo de los coágulos:



Video sobre el manejo de los coágulos del sistema Interi

Unidad de terapia

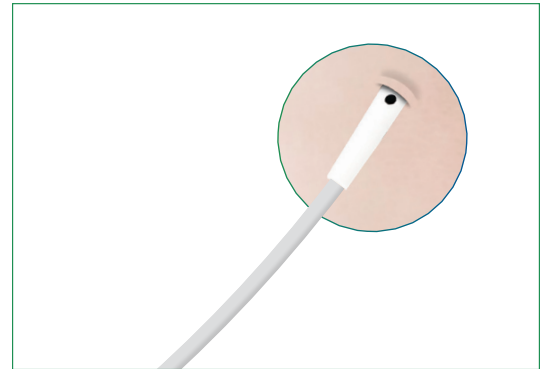


Punto de salida

Lugar donde la sonda atraviesa la piel.



Funda de transporte

Bolsa para colocar la unidad de terapia y usarla como bolso o riñonera.

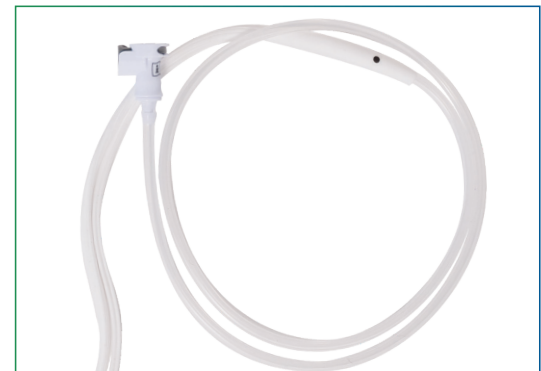


Recolector Interi

Sonda que se coloca en su cuerpo que permite ejercer una suave presión de succión en todo el espacio interno y extraer fluido.



Es posible que no fluya una gran cantidad de sangre o fluido cuando encienda la unidad de terapia y que el flujo varíe.

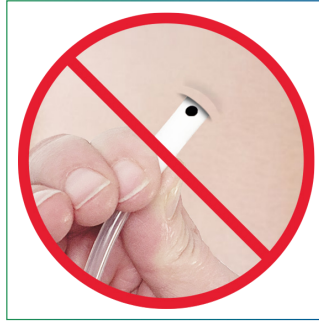

Nunca tire de la sonda ni del punto de salida.



Controle el punto de salida e informe a su médico si se ve inflamado o enrojecido, o si hay fugas de fluido.



Guarde siempre la unidad de terapia en la funda de transporte. Esto reducirá tirones en el punto de salida.



Nunca presione el vástago que se encuentra en la parte inferior de la unidad de terapia.



Si el conector no encaja en su sitio, coloque la uña del pulgar sobre la línea horizontal gris para que el botón gris vuelva a su posición.

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE

- No use la unidad de terapia si se ha roto el precinto de seguridad o si sospecha que está dañada.
- No conecte la sonda a ningún otro dispositivo de presión negativa o de succión que no sea la unidad de terapia.
- La sonda del sistema conlleva un riesgo de estrangulamiento. Manténgala fuera del alcance de los niños pequeños.
- Mantenga el punto de salida protegido de contaminación o lesiones. Limpie el punto de salida según las indicaciones de su médico. Informe a su médico si el punto de salida se ve inflamado o enrojecido, o si hay fugas de fluido.
- No exponga la sonda ni la unidad de terapia a temperaturas inferiores a 68°F/20°C o superiores a 86°F/30°C.
- MR El recolector y su conector son aptos para las resonancias magnéticas (RM) y para la sala del escáner de RM.
 - MR La unidad de terapia no es apta para RM. Desconéctela y déjela fuera de la sala del escáner de RM, ya que podría suponer un peligro debido al efecto proyectil.
- Si se produce un goteo de fluido corporal fuera del sistema, límpielo según las indicaciones de su proveedor de atención médica.
- La unidad de terapia es de un solo uso. (X)
- Una vez que se activa, la unidad de terapia no puede vaciarse ni reiniciarse.
- Si el conector del recolector se desconecta temporalmente de la unidad de terapia, esta mantendrá la succión hasta que se vuelva a colocar el conector.
- Los componentes del sistema se suministran listos para su uso. No intente esterilizar ninguno de ellos.
- Para limpiar cualquier parte del sistema:
 - Lávese las manos con agua y jabón.
 - Limpie la unidad de terapia y la sonda con una de las siguientes soluciones: Alcohol isopropílico al 70% O 1 1/2 cda. de fluido lavavajillas en 16 onzas (2 tazas) de agua
 - No use otros productos químicos, soluciones o métodos, ya que esto podría dañar o contaminar el sistema.
- Deseche la unidad de terapia usada de acuerdo con las indicaciones de su médico.
- Si tiene inquietudes sin resolver, llame a su médico.

SISTEMA INTERI®: DIARIO DE REGISTRO DE FLUIDO de _____

FECHA	Unidad de terapia n.º	Tamaño de la unidad de terapia	Momento	Registro del nivel de fluido (punto máximo)	Cantidad de AUMENTO desde la última revisión	¿Se cambió la unidad??
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Mañana			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Mediodía			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Tarde			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Hora de dormir			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
				Fluido TOTAL para esta fecha:	ml	
FECHA	Unidad n.º	Tamaño de la unidad	Momento	Registro del nivel de fluido	Aumento desde la última revisión	¿Se cambió la unidad??
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Mañana			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Mediodía			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Tarde			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Hora de dormir			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
				Fluido TOTAL para esta fecha:	ml	
FECHA	Unidad n.º	Tamaño de la unidad	Momento	Registro del nivel de fluido	Aumento desde la última revisión	¿Se cambió la unidad??
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Mañana			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Mediodía			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Tarde			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Hora de dormir			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
				Fluido TOTAL para esta fecha:	ml	
FECHA	Unidad n.º	Tamaño de la unidad	Momento	Registro del nivel de fluido	Aumento desde la última revisión	¿Se cambió la unidad??
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Mañana			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Mediodía			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Tarde			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Hora de dormir			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
				Fluido TOTAL para esta fecha:	ml	
FECHA	Unidad n.º	Tamaño de la unidad	Momento	Registro del nivel de fluido	Aumento desde la última revisión	¿Se cambió la unidad??
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Mañana			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Mediodía			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Tarde			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Hora de dormir			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
				Fluido TOTAL para esta fecha:	ml	
FECHA	Unidad n.º	Tamaño de la unidad	Momento	Registro del nivel de fluido	Aumento desde la última revisión	¿Se cambió la unidad??
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Mañana			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Mediodía			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Tarde			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Hora de dormir			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
				Fluido TOTAL para esta fecha:	ml	
FECHA	Unidad n.º	Tamaño de la unidad	Momento	Registro del nivel de fluido	Aumento desde la última revisión	¿Se cambió la unidad??
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Mañana			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Mediodía			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Tarde			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 500	Hora de dormir			NO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/>
				Fluido TOTAL para esta fecha:	ml	

Para obtener más recursos, visite:
www.icsurgical.com/resources/education-materials



IC SURGICAL
 ADVANCING SURGICAL OUTCOMES



Fabricado para:
 IC Surgical, Inc. | 2155 East Paris Suite 115, Grand Rapids, MI 49546 USA
www.icsurgical.com | Preguntas: 1-833-615-1143

IFU 1001 REV 4-SP